

関節の固定・保持に便利なスプリント、試してみませんか？

Rolyan® Splinting Materials

アクアプラストT 無料体験会



9.30 SAT
土

18:00～20:00 (受付 17:30～)

場所：酒井医療株式会社 本社
セミナールーム

東京都新宿区山吹町358-6

TEL 03 -5227-5771

内容

形状記憶性プラスチック素材「アクアプラストT」の説明、制作体験など新しいスプリント素材を試したい方向けの体験会です。

申込

WEB申込フォームでお申込みください。

酒井医療フィジオ セミナー

検索



こちらのQRコードからも
申込フォームへアクセスできます。

定員

先着限定24名 ※最少催行人数：10名

関節の固定・保持に便利なスプリント

形状記憶性プラスチック素材 軟化成形型副木 手指足指用【届出番号 13B2X00081000014】

アクアプラストT

A962-50 (1.6厚mm)



抜群の成形しやすさ

常温で硬化しているプラスチックシートは 65℃～ 75℃で軟化し透明になります。患部に巻きつけ、硬化し白くなれば完成。数分で簡単に成形することができます。症状にあわせて、様々なタイプを成形することができます。



優れた装着感

患部に巻きつける成形方法のため、患部の形どおりの副木となりますので、ズレも少なく、軽量のため装着感に優れています。



特出したコストパフォーマンス

46cm×61cm の大きなシートから、作成した副木の数だけ算定できます。

手指用であれば、1枚のシートから 50 個～ 100 個の副木を作ることができ、材料コストは 100 円～ 200 円程度と大変お得です。

もちろん、同じシートから小型～大型の副木を成形されても、それぞれの加算額で算定することができます。

金属副子等加算※

軟化成形使用型	加算額
①大型金属副子等加算	1,030 円
②中型金属副子等加算	910 円
③小型金属副子等加算	680 円

※参考資料：柔道整復に係る療養費の概要より「骨折、脱臼の整復又は不全骨折の固定に当たり、特に施療上金属副子、合成樹脂副子又は副木・厚紙副木（以下「金属副子等」という。）を必要とし、これを使用した場合は、整復料又は固定料に次の額を加算する。」

酒井医療株式会社では軟化成形型の素材はアクアプラスト以外にも、
いろいろな特長をもった副木素材を取り扱っております。
サンプルをご用意できるものもありますので、お気軽にお問い合わせください。